



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PAKETLEME CİHAZI KULLANMATALİMATI

Doküman Kodu : DS.TL.03	Yayın Tarihi:21/01/2015	Revizyon Numarası:1	Revizyon Tarihi:12/05/2023	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/1
-------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------

- AMAÇ:** Bir hastanenin Merkezi Sterilizasyon ünitesinde paketleme makinesi kullanımı ve kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir.
- KAPSAM:** Sterilizasyon, Teknik hizmetleri.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Fakültenin Sterilizasyon, Teknik hizmetler birimlerindeki personel sorumludur.
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Cihaz kullanımı:**
 - Paketleme cihazı açma düğmesinden açılır ve uygun ısıya gelip gelmediği kontrol edilir.
 - Cihaz, paketlenen malzemenin cinsine göre uygun ısıya getirilir. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda kapatılmalıdır.
 - Paketleme ruloları üzerinde gösterilen oklar yönünde kapama işlemi yaptırılır.
 - Paketleme rulolarının kağıt tarafına delinme riskine karşı yazı yazılmamalı ve sterilizasyon geçirgenliğini riske atmamak için etiket yapıştırılmamalıdır.
 - Kapama cihazları ile paketleme yapılırken cihaz paketlerinin arkasına otomatik olarak; paketleme tarihi, son kullanma tarihi, saati ve paketleme yapanın adı yazılır.

6.2. Cihaz Bakımları:

6.2.1. Personel tarafından yapılır ve “Cihaz Bakım Çizelgesi” ne kaydedilir.

Günlük bakım	- Nemli bezle ile temizlenir.
Haftalık bakım	- Cihazın içerisindeki tozlar basınçlı hava ile temizlenir. - Cihazın yazı kartuşu kontrol edilir.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1.Cihaz Bakım Çizelgesi

HAZIRLAYAN(.../.../....)	KONTROL EDEN(.../.../....)	ONAYLAYAN(.../.../....)
	Kalite Yönetim Direktörü	Dekan