



**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**KOMPRESÖR BAKIM VE KONTROL FORMU (AYLIK)**

Doküman  
Kodu:TY.FR.10

Yayın  
Tarihi:03/02/2020

Revizyon  
Numarası:1

RevizyonTarihi:24/05/  
2023

Sayfa  
No/SayfaSayısı:1/2

**YAPILACAK KONTROLLER**

- 1- Günlük olarak cihazda oluşan suyu tahliye et.
- 2- Haftalık olarak genel temizliğini yap.
- 3- Aylık olarak cihazın iç kısmını (hava filtresi ve fan) basınçlı hava ile temizle.
- 4- 2000 saatte cihazın yağını, hava filtresini değiştir. Elektrik motoruna gres yağı pompala.
- 5- Cıvatalar ve diğer gevşeyen mekanik parçaları sık.
- 6- Kasnak ve kayış sistemini kontrol et.
- 7- Emniyet supaplarını kontrol et.
- 8- Elektrik aksamını kontrol et.
- 9- Bakım esnasında koruyucu teçhizat kullan, iş elbiseni giy.
- 10- İş güvenliği kurallarına uy.

MARKA MODEL	SERİNO	BAKIM PERYODU	AYLIK
TARİH	CİHAZINDURUMU	BAKIMI YAPAN	İMZA
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan



**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**KOMPRESÖR BAKIM VE KONTROL FORMU (AYLIK)**

Doküman  
Kodu:TY.FR.10

Yayın  
Tarihi:03/02/2020

Revizyon  
Numarası:1

RevizyonTarihi:24/05/  
2023

Sayfa  
No/SayfaSayısı:1/2

.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan