



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KOMPRESÖR BAKIM VE KONTROL FORMU (AYLIK)

Doküman
Kodu:TY.FR.18

Yayın
Tarihi:03/02/2020

Revizyon
Numarası:1

RevizyonTarihi:24/05/
2023

Sayfa
No/SayfaSayısı:1/2

YAPILACAK KONTROLLER

- 1- Günlük olarak cihazda oluşan suyu tahliye et.
- 2- Haftalık olarak genel temizliğini yap.
- 3- Aylık olarak cihazın iç kısmını (hava filtresi ve fan) basınçlı hava ile temizle.
- 4- 2000 saatte cihazın yağını, hava filtresini değiştir. Elektrik motoruna gres yağı pompala.
- 5- Cıvatalar ve diğer gevşeyen mekanik parçaları sık.
- 6- Kasnak ve kayış sistemini kontrol et.
- 7- Emniyet supaplarını kontrol et.
- 8- Elektrik aksamını kontrol et.
- 9- Bakım esnasında koruyucu teçhizat kullan, iş elbiseni giy.
- 10- İş güvenliği kurallarına uy.

MARKA MODEL	SERİNO	BAKIM PERYODU	AYLIK
TARİH	CİHAZINDURUMU	BAKIMI YAPAN	İMZA
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KOMPRESÖR BAKIM VE KONTROL FORMU (AYLIK)

Doküman
Kodu:TY.FR.18

Yayın
Tarihi:03/02/2020

Revizyon
Numarası:1

RevizyonTarihi:24/05/
2023

Sayfa
No/SayfaSayısı:1/2

.../.../.....			
.../.../.....			
.../.../.....			

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan