



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KOMPRESÖR KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

Doküman Kodu: TY.TL.09

Yayın Tarihi:03/02/2020

Revizyon Numarası:1

Revizyon Tarihi:24/05/2023

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2

1.AMAÇ

Bu talimatın amacı; GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi'nde kullanılan Kompresörlere yapılacak bakımların ve hava basıncının istenilen bara çıkarmak için gerekli kullanım işleyişini belirlemek yolu ile bunların iş güvenliğine uygun ve uzun süreli kullanımını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat; GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi'nde kullanılan Kompresörlere yapılacak bakımların ve hava basıncının istenilen bara çıkarmak için gerekli kullanım işleyişini belirlemek yolu ile bunların iş güvenliğine uygun ve uzun süreli kullanımını sağlamakla ilgili faaliyet, yetki ve sorumlulukları kapsar.

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Bakım-Onarım Elemanı, uygulamasının takibinden Teknik Birim Sorumlusu ve onaylanmasından Fakülte Sekreteri sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

KULLANIM

- Her sabah gelindiğinde ana şalter aç.
- Kompresör üzerinde bulunan kabindeki açma düğmesine basılarak açılır.
- Kompresör havası dolması (kompresör durana kadar) için bekle.
- İş bitiminde kompresör üzerindeki kabin içindeki kapatma düğmesine basılarak kapat.
- Kompresör durduktan sonra ana şalteri kapat.
- Kompresör dış yüzeyi temiz bir bezle sil.

BAKIM

Genel Bakım

- Bakıma başlamadan önce makinenin elektrik aksam bağlantılarını kes. Pano üzerine "BAKIMDA" yazısı tak ve bakım tamamlandıktan sonra çıkart.
- Günlük olarak cihazda oluşan suyu tahliye et.
- Haftalık olarak genel temizliğini yap.
- Aylık olarak cihazın iç kısmını (hava filtresi ve fan) basınçlı hava ile temizle.
- 2000 saatte cihazın yağını, hava filtresini değiştir. Elektrik motoruna gres yağı pompala.
- Cıvatalar ve diğer gevşeyen mekanik parçaları sık.
- Elektrik aksamını kontrol et.
- Arıza durumunda yetkili servise haber ver.

İş Güvenliği Kuralları

- Kontrol esnasında koruyucu teçhizat kullan, iş elbiseni giy.
- İş güvenliği kurallarına uy.Makinelerin elektrik ve hava aksam bağlantılarını kes, iç elektrik aksamıyla oynama.
- Bakımını yaparken, makine-cihazın kapalı olup olmadığını kontrol et. Çalışır durumda yapılması gereken kontroller dışında kapalı olmalıdır.
- Makinelere sigara, ateş vb. parlayıcı maddelerle yaklaşma.
- Bakımlar ve kontroller, görevli teknisyen tarafından fakülte genelinde "Kompresör Bakım ve Kontrol Formu"na kaydedilir.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Kompresör Bakım ve Kontrol Formu

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan