



**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**DİŞ ÜNİTİ KULLANMA TALİMATI**

Doküman Kodu: TY.TL.12	Yayın Tarihi:27/07/2023	Revizyon Numarası:0	Revizyon Tarihi:-	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/1
---------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------------------

### 1. AMAÇ

Fakültemizde bulunan dental ünit cihazlarının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

### 2. KAPSAM

Bu talimat; Fakültemiz bünyesinde bulunan dental ünit cihazının kullanımını kapsar.

### 3. SORUMLULUKLAR

Tüm Birimler, Dekan, Dekan Yardımcısı

### 4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

### 5.FAALİYET AKIŞI AÇARKEN

1. Hava ve su vanasını açınız.
2. Açma-Kapama düğmesine basınız.
3. Kreşuarın suyunu 2 dakika boş çalıştırınız.
4. Aeratör ve mikromotor başlıklarının düzgün olarak takıldığından emin olunuz.
5. Reflektör ışığının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
6. Aeratör ve mikromotor başlıklarının içindeki fazla yağın çıkması için pedal yardımıyla 1 dakika boyunca çalıştırınız.
7. Ünitte ışıklı dolgu cihazı bulunuyorsa açma düğmesine basınız ve çalıştığını kontrol ediniz.

### KAPATIRKEN

1. Aeratör ve mikromotor başlıklarını çıkarınız.
2. Açma kapama düğmesine basınız.
3. Hava ve su vanalarını kapatınız.
4. Bağımsız su deposu olan ünitlerin su deposunu boşaltınız.

### TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)
	Kalite Güvence Koordinatörü	Dekan



**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**DİŞ ÜNİTİ KULLANMA TALİMATI**

Doküman Kodu: TY.TL.12	Yayın Tarihi:27/07/2023	Revizyon Numarası:0	Revizyon Tarihi:-	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/1
---------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	------------------------------

1. Kreşuar çamaşır suyu gibi sıvı bir temizleme maddesi ile temizlenmelidir.
2. Kreşuar çanağı içindeki süzgeç **HERGÜN** temizlenmelidir.
3. Tetiyer başlığı ve hasta koltuğu her hastadan sonra yüzey dezenfektanı ile temizlenmelidir.

**GENEL BAKIM**

1. Filtreli hava regülâtörünün filtre kısmını her hafta en az bir kez suyunu tahliye etmek suretiyle temizleyiniz.
2. Hava kompresörünün deposunu her akşam çalışma bitiminde tahliye ediniz.
3. Başlıkları **HERGÜN** en az bir kez uygun bir dezenfektanla temizleyiniz.
4. Arıza halinde yetkili servise başvurulmak üzere ilgili birime haber veriniz.

**AYLIK BAKIM**

1. Cihazın hava basınç kontrolü ve su kontrolü yapılır.

**6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)
	Kalite Güvence Koordinatörü	Dekan